

ortoteam sleep



ortoteam

Tessa Llimargas
Gerente c/ Avellaner, 45
08230 Matadepera
Barcelona _ España
Tel. 93 787 19 18
93 787 06 15
Fax 93 787 19 18
tecnico@ortoteam.com
www.ortoteam.com

moses express 70€ SIN ADAPTAR 170€ ADAPTADO

El Moisés express ™ es una nueva opción de avance mandibular intraoral para el tratamiento de la apnea del sueño y el ronquido. Sus características de diseño únicas trabajan a nivel dilatador de la vía aérea oral. Es el primer dispositivo de este tipo, ajustable y personalizable que puede ser entregado en el sillón en 5 - 10 minutos. Es un aparato tipo protector bucal fabricado de material flexible, en inyección de doble capa moldeada. La capa interna se ablanda en agua caliente y toma la forma de los dientes posteriores para un ajuste seguro, cómodo y confortable. La capa exterior se mantiene estable. Los arcos superior e inferior se establecen en una posición predeterminada mediante la selección de uno de los nueve Vástagos de mordida patentados. Hay sólo un tamaño de Moisés express ™ pero puede ajustarse en tres alturas verticales y tres posiciones horizontales.

- Se ajusta fácilmente por el personal auxiliar entrenado bajo la supervisión de un dentista o médico. No hay fabricación de laboratorio.

- Mediante el apoyo en la mandíbula inferior en una posición ligeramente avanzada, el Moisés express ™ avanza la lengua de forma pasiva.
- El diseño permite que los labios permanezcan cerrados cómodamente para facilitar la respiración nasal y mejora la altura de la dimensión vertical.
- La apertura anterior entre los dientes superiores e inferiores permite el avance de la lengua hacia adelante hacia los labios. (Sellado labial)
- El Moisés express ™ aumenta el volumen del espacio en la boca para la lengua, disminuyendo la probabilidad de colapso de las vías respiratorias durante el sueño.
- Permite fácilmente la respiración nasal/bucal y el habla clara.
- Es muy resistente - no se rompe ni se romperá si se cae/pisa.
- El único equipo necesario es una olla para calentar el agua, un termómetro y pinzas.
- Hay muy poco o nada que cortar o pintar y pocos ajustes de los puntos de dolor.
- Si no se hace perfectamente la primera vez, sólo hay que repetir el proceso hasta que sea perfecto.
- Es FDA 510-K Food and drug accepted en Usa.
- Y la mejor noticia es que Moisés express ™ va a ser muy asequible para tratar pacientes con apnea y ronquidos.