

ORTODONCIA REMOVIBLE E INTERCEPTIVA



ortobeam

La calidad no es cuestión de tamaño.

Nuestra línea actual de productos, se encuentra continuamente suplementada y mejorada por innovaciones que facilitan la labor del profesional.



ORTODONCIA REMOVIBLE

APARATOLOGÍA ORTODONTICA REMOVIBLE

El mundo de los aparatos de la Ortodoncia Removible es inacabable, ya que el desarrollo de los primeros removibles, la placa activa y el activador ha diversificado su construcción.

Entre los más comunes encontramos:

PLACA HAWLEY

Los incisivos y caninos del maxilar sup/inf, se mantienen en su posición mediante el acrílico en sus superficies palatinas y arco labial de 0,8 mm muy bien adaptado. Una buena fijación en la zona anterior, es básica, para conseguir una correcta posición de las piezas anteriores. El anclaje se consigue con la perfecta adaptación del arco labial en las zonas interproximales de los caninos. Esta zona del alambre tiene una función de retención. Si no existe espacio suficiente en esta zona entre lateral y caninos, el alambre pasará por distal del canino, donde normalmente no tendremos problemas de espacio, la retención se efectuará en este caso sobre el primer premolar.

GUÍAS DE SANDER

Aparato de tipo removible, que corrige clase II. Fabricación similar al del Hawley, pero este lleva la doble guía metálica anterior adaptada en la placa de expansión superior. De esta manera, el paciente en edad de crecimiento avanza la mandíbula al apoyarse en el plano acrílico lingual de la placa inferior.

BIONATOR

Aparato removible, que tiene como objetivo reeducar la posición de la lengua avanzándola, manteniendo la dimensión vertical, gracias a los planos oclusales acrílicos, que permiten el control eruptivo. De esta manera la dentadura se va posicionando correctamente. Así como los demás, su fabricación también es en acrílico, alambres vestibulares y palatinos... Hay distintos tipos, el estándar corrige las Clase I y la Clase II, el de Clase III y el de mordida abierta.

BIMLER

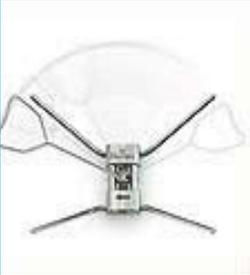
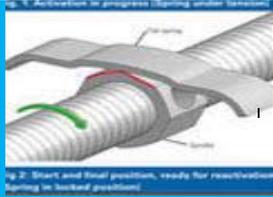
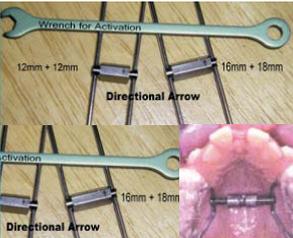
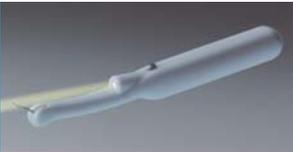
Aparato bimaxilar con estructura de resina, con alambres, resortes palatinos y tipo Coffin. Se confecciona a partir de una mordida constructiva. Utilizado especialmente en la corrección de Clases II, gracias al sistema de elipse en el alambre. Este activador en las tres dimensiones, permite dar distintas posiciones a la mandíbula e ir avanzando poco a poco. También existe el diseño en Clases III.

En este apartado podrá encontrar todos los materiales necesarios para la fabricación de estos aparatos y muchos más.



Ortodoncia Removible e Interceptiva

Tornillos de expansión estandard, DISYUNLOK, Disyunción Distractor, Supertornillo

	Nº de piezas/Colores	Medidas	Referencia
 <p>DISYUNLOCK 8</p> <p>Tornillos de disyunción con brazos doblados automáticamente, para soldarse con facilidad. Caja metálica diseñada para encajar perfectamente en la bóveda palatina.No tiene vuelta atrás.</p>	<p>1 unidad</p> <p>10 unidades</p>	<p>Exp.8mm</p> <p>Long.12mm</p> <p>1/4 vuelta: 0.9</p>	<p>OR1342/1</p> <p>OR1342/2</p>
 <p>DISYUNLOCK 10</p> <p>Como el Disyunlock 8, pero con 2mm más</p>	<p>1 unidad</p> <p>10 unidades</p>	<p>Exp.10mm</p> <p>Long.14mm</p> <p>1/4 vuelta: 0.9</p>	<p>OR1343/1</p> <p>OR1343/2</p>
 <p>EXPANSOR LINGUAL</p> <p>Diseño igual al disyuntor Hyrax, pero 2 brazos en lugar de 4. Su pequeño tamaño permite ubicarlo en el maxilar inferior o superior con comodidad. También distala molares.</p>	<p>1 unidad</p>	<p>Expansión: 8 mm</p> <p>Ancho x Alto: 12 x 4 mm</p> <p>Longitud: 7,5 mm</p>	<p>OR1014</p>
 <p>EXPANSOR ESTANDARD</p> <p>Tornillo de expansión estable , para expansiones transversales y distales de la arcada superior e inferior.</p>	<p>10 unidades</p> <p>50 unidades</p>	<p>Exp máx 7</p> <p>11x7,2x3,1</p> <p>¼ vuelta:0,8</p>	<p>OR1344/1</p> <p>OR1344/2</p>
 <p>EXPANSOR TITANIO</p> <p>Tornillo de expansión estable , para expansiones transversales y distales de la arcada superior e inferior.Las misma características del anterior pero, es de "Titanio".</p>	<p>10 unidades</p> <p>50 unidades</p>	<p>Exp máx 7</p> <p>11x7,2x3,1</p> <p>¼ vuelta:0,8</p>	<p>OR1345/1</p> <p>OR1345/2</p>
 <p>SUPER SCREW</p> <p>Diseño único para expansión o disyunción rápida con llave inglesa. Guía indicadora lateral. Tope hexagonal evita cierre.</p>	<p>Azul</p> <p>Dorada</p>	<p>Expansión: 12 mm</p> <p>Expansión: 18 mm</p> <p>Llave activadora</p> <p>Llave activadora</p> <p>Tope hexagonal 12mm</p> <p>Tope hexagonal 18mm</p>	<p>OR1018</p> <p>OR1019</p> <p>OR1020</p> <p>OR1021</p> <p>OR1022</p> <p>OR1023</p>
 <p>ACULIGHT</p> <p>Llave especial con luz incorporada para la activación de tornillos de disyunción en boca.</p>			<p>OR1024</p>

Ortodoncia Removible e Interceptiva

Tornillos de expansión 3 sectores, clases II, incisivos, abanico

Nº de piezas

Medidas

Referencia

BERTONI MULTISECTORES



Tornillos de expansión multisectorial Bertoni. Permite la protrusión del sector anterior y la expansión simétrica de sectores posteriores.

2

14x13,6
Exp.3mm
¼ vuelta:0.4-0.8

OR1346/1

BERTONI INDEPENDIENTE



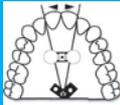
Tornillos de expansión multisectorial Bertoni. Permite la protrusión del sector anterior y la expansión independiente de ambos sectores posteriores.

2

14x13,6
Exp.3mm
¼ vuelta:0.4

OR1347/1

TORNILLO DE APERTURA EN ABANICO



Se compone de dos partes: la central, de apertura, y la auxiliar que hace de bisagra con soporte. Cada giro abre 0.8mm

5 unidades

OR1028

LLAVE ACTIVADORA EN ABANICO



Para tornillos de disyunción

10 unidades

OR1035

DESTORNILLADOR



Para la activación de tornillos individuales

10 unidades

OR1036

LLAVE PARA TORNILLOS DE EXPANSIÓN



10 unidades

OR1037/1

100 unidades

OR1037/2

Ortodoncia Removible e Interceptiva

RESINA ESTABLE, ACRÍLICO Y DOSIFICADORES

	Nº de piezas/Colores	Medidas	Referencia	
 <p>RESINA ESTABLE "M" POLÍMERO</p> <p>Resina autopolimerizable para la técnica de mezcla y sal y pimienta . Esta resina se caracteriza por su variedad de utilidades y su prolongado tiempo de trabajo , así como su fluidez.</p>	Transparente	1 Kg 10 Kg 20 Kg	OR1039/1 OR1039/2 OR1039/3	
	 <p>RESINA ESTABLE S+M , MONÓMERO</p> <p>Monómero que su utiliza para la técnica "M" y "S". Puede mezclarse con colorante.</p>	transparente	0.5 l	OR1041/1
		rosa	0,5 l	OR1042/1
 <p>transparente</p> <td>5 l</td> <td>OR1041/2</td>	5 l	OR1041/2		
 <p>RESINA STEADY NEON - Polímero</p> <p>Polímero acrílico en atractivos colores neon fosforescentes. Nuevo pigmento que permite una fácil y uniforme dispersión.</p>	Amarillo Púrpura Rojo Azul Verde	200 g 200 g 200 g 200 g 200 g	OR1043 OR1044 OR1045 OR1046 1047	
 <p>VASOS SILICONA</p> <p>Vaso de silicón transparente para mezclado. De gran estabilidad debida al pie en ventosa, posee además una práctica embocadura para el vertido en las versiones media y grande.</p>	3 piezas 2 piezas 1 pieza	5 ml 30 ml 70 ml	OR1048 OR1049 OR1050	
 <p>BOTELLAS EN SPRAY</p> <p>Para polímero y monómero, con punta para dosificar y tapón. Agujereando el extremo del dosificador, conseguimos un goteo perfecto del monómero.</p>	1 unidad 5 unidades		OR1051/1 OR1051/2	
 <p>DOSIFICADOR DE MONÓMERO</p>	5 unidades		OR1052	
 <p>DOSIFICADOR DE POLÍMERO</p>	5 unidades		OR1053	

Ortodoncia Removible e Interceptiva

Accesorios para la técnica Resina Estable

		Colores	Medidas / Nº de piezas	Referencia
	<p>COLORANTE CONCENTRADO</p> <p>Para el mezclado con monómero "Estable-Resin"</p>	Azul Amarillo Rojo Negro Verde	100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml	OR1054 OR1055 OR1056 OR1057 OR1058
	<p>PURPURINA</p> <p>Para el mezclado con polímero "Resina Estable"</p>	Plata Oro Azul Rojo Verde	50 g 50 g 50 g 50 g 50 g	OR1059 OR1060 OR1061 OR1062 OR1063
	<p>MOTIVOS PARA INCLUSIÓN</p> <p>Dibujos para incusión en acrílico o en planchas Duracryl resistentes al monómero.</p>	Surtido Motivo individual	400 unidades 20 unidades	OR1064 OR1065
	<p>LÍQUIDO SEPARADOR PARA ORTODONCIA</p> <p>Separador de acrílico para modelos de yeso.</p>		0,5 l 5 l	OR1066/1 OR1066/2

Ortodoncia Removible e Interceptiva

Medidas / N° de piezas

Referencia



FRESA DE CORTE DE RANURA

El diámetro de corte, corresponde al del soporte de plástico del tornillo de expansión.
Un pequeño manguito evita que el polvo de yeso penetre en la pieza de mano.



LACA DE RECUBRIMIENTO

Laca de recubrimiento transparente para sellado y pulido de zonas inaccesibles en las placas acrílicas.
El kit incluye 100ml de laca de recubrimiento, detergente y taza.

1 €

OR1068



TUBO DE SILICONA (LIP BUMPER)

Para el recubrimiento de alambres.
De $\varnothing = 0,6$ a $0,8$ mm.

TUBO TERMO - CONTRAIBLE, 1,2 mm.

Se contrae con la aplicación de calor, para un grosor de alambre de $\varnothing 0,6$ a $1,1$ mm.

1 m
10 m

OR1069/1
OR1069/2

1 m
10 m

OR1070/1
OR1070/2



ALAMABRE ESTANDARD

Alambre de acero inoxidable en rollo.
Una sola presentación.

0,8mm - 500gr

OR1348/1

0,9mm - 500gr

OR1349/1



ALAMBRE NIQUEL FREE

Alambre de aleación especial de acero inoxidable, libre de níquel, evitando así las alergias motivadas por este material.
Una sola presentación

0,80mm - 20m

OR1350/1

0,9mm - 10m

OR1351/1



ALAMBRE TMA TUBO

Necesario para construir el péndulo de Hilgers.
Alambre de TMA en .032"

$\varnothing 0,8$ mm
10 varillas

OR1087

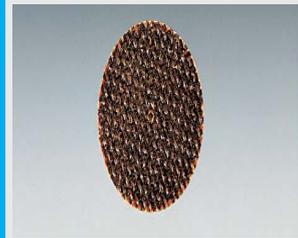
Ortodoncia Removible e Interceptiva

Técnica de Set-Up y Posicionador

		Nº de piezas/Colores	Medidas	Referencia
	CERA ROSA Cera rosa para modelar Planchas de 174x90mm Espesor de 1,5		18 Láminas	OR1207
	CERA PARA SET-UP EN BARRAS Cera semiblanda, no se contrae.	3 unidades Rojas	150 g	OR1089
	RESINA ALIVIADORA AZUL Resina fotopolimerizable, azul, opaca, para la fijación de los dientes individualizados en el set-up y el sellado de los cortes interproximales. También utilizada como espaciador en férulas de blanqueamiento o peridontales. Evita tener que duplicar.	4 unidades	1,6g /unidad	OR1092
	MEDIDOR DE INCLINACIÓN Y ANGULACIÓN Medidor de los dientes sobre los modelos durante el proceso de set-up manual. Alta precisión			OR1095
	MEDIDOR DE HORAS DE USO THERAMON Lector Microchip Sistema de registro que permite al clínico realizar el seguimiento y documentación en tiempo real de horas de uso de cualquier aparato intraoral por parte del paciente mediante la implantación de un microchip que almacena los datos. Este sencillo sistema cuenta con tres componentes: chip, lector y software, para la activación y lectura de datos.	5 unidades		EQ2001 EQ2003

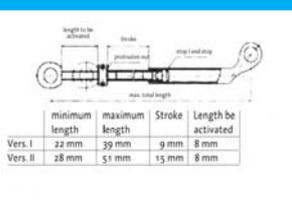
Ortodoncia Removible e Interceptiva

Técnica de Set-Up y Posicionador

	Nº de piezas	Medidas	Referencia
 <p>YESO PARA SET-UP Yeso duro de fácil manipulación con segueta y cúter.</p>		2,5 kg 5,0 kg	OR1096/1 OR1096/2
 <p>FRESA PARA MODELOS SET-UP Fresa de metal duro especial para el perforado y cortes verticales de separación en el yeso.</p>	1 pieza	Ø 2,5 mm	OR1097
 <p>DISCO DE CORTE PARA SET-UP Disco de nylon irrompible para el corte de modelos de yeso.</p>	1 unidad 10 unidades	Ø 38 mm Ø 38 mm	OR1098/1 OR1098/2
 <p>DISCO DE CORTE DE DIAMANTE Con cortes de refrigeración en todo el perímetro del disco. Para cortes super precisos de set-up, así como para cortar férulas.</p>	1 unidad	Ø 18 mm	OR1099
 <p>SEGUETA DE CORTE PARA SET-UP La barra en forma de arcada facilita el giro a la hora de cortar. Gran precisión gracias al uso de las hojas finas de corte</p>	1 unidad + 6 recambios 10 recambios		OR1100/1 OR1100/2
 <p>SILICONAS BAYER Para la fabricación de posicionador. BRILLO Recubrimiento para posicionadores. Evita la absorción de humedad. Da brillo. SILICONA SEPARADORA Para conseguir transparencia al sacar de mufla.</p>	5 cartuchos 5 cartuchos 1 cartucho 1 cartucho	48 ml / Dureza 50 48 ml / Dureza 70 48 ml 7 g	OR1103 OR1104 OR1105 OR1106

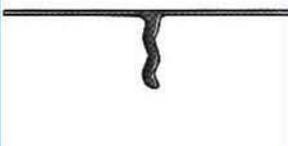
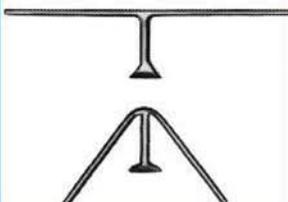
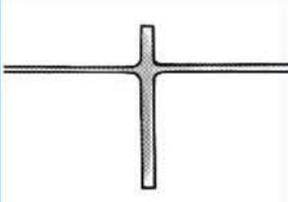
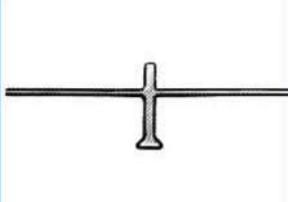
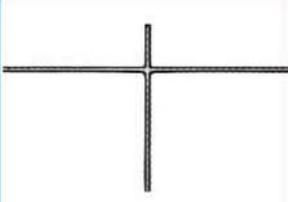
Ortodoncia Removible e Interceptiva

Accesorios preformados, botones, ganchos, bielas de Herbst, IST Plus

	Medidas / N° de piezas	Referencia															
 <p>BOTONES REMOVIBLES Para su polimerización dentro de férulas, prótesis u otros aparatos (vea también aparato IST).</p>	Bolsa 10 unidades	OR1107															
 <p>ANILLOS DE INCREMENTO DE LONGITUD Permiten la activación progresiva, desmontando el vástago de conexión en los aparatos de *Herbst añadiendo estos anillos. *Herbst, es una marca registrada de Denaturum.</p>	1 mm avance / 10 unidades 2 mm avance / 10 unidades 3 mm avance / 10 unidades 4 mm avance / 10 unidades 5 mm avance / 10 unidades	OR1108 OR1109 OR1110 OR1111 OR1112															
 <p>SISTEMA DE BISAGRA IST/HERBST Para el tratamiento de Clases II/ Apnea Soldado a bandas o polimerizado en aparatos removibles.</p>																	
 <p>BIELA INVERTIDA 22-39mm</p>	1 par de bielas	OR1341															
 <p>BIELAS ESTANDARD Bielas telescópicas sin stop HF35 Bielas telescópicas con stop</p>	1 par de bielas	OR1113															
 <p>Dos longitudes distintas:</p> <p>BIELA IST TELESKOP HF9.8 mm de activación(22mm)</p> <p>BIELA TELESKOP HF15. 8 mm de activación.(28mm)</p>	1 par de bielas	OR1293															
 <p>ELEMENTOS DE MONTAJE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>minimum length</th> <th>maximum length</th> <th>Stroke</th> <th>Length be activated</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vers. I</td> <td>22 mm</td> <td>39 mm</td> <td>9 mm</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>Vers. II</td> <td>28 mm</td> <td>51 mm</td> <td>15 mm</td> <td>8 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>-Guía posicionadora IST -Elementos fijación para resina. -Elementos de fijación para soldar -Tornillos allen fijación biela</p>		minimum length	maximum length	Stroke	Length be activated	Vers. I	22 mm	39 mm	9 mm	8 mm	Vers. II	28 mm	51 mm	15 mm	8 mm	1 par de bielas 1 par de bielas	OR1294 OR1295 OR1297 OR1298 OR1121
	minimum length	maximum length	Stroke	Length be activated													
Vers. I	22 mm	39 mm	9 mm	8 mm													
Vers. II	28 mm	51 mm	15 mm	8 mm													
 <p>BIELA IST PLUS BIELA OCLUSAL -Guía telescópica ajustable central -Fácil fijación, desmontable con llave hexagonal -Incluido en acrílico</p>		OR1124															

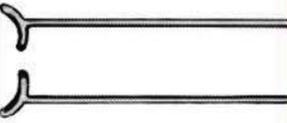
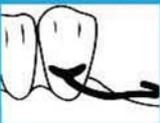
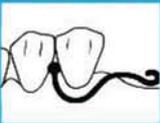
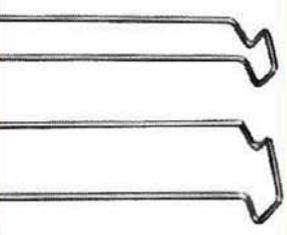
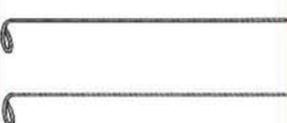
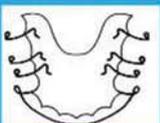
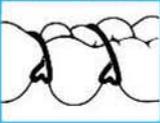
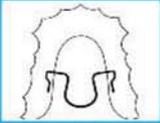
Ortodoncia Removible e Interceptiva

Ganchos preformados

		Medidas	Nº de piezas	Referencia
	<p>GANCHO O</p> 	0,9 mm 0,9 mm	10 unidades 100 unidades	OR1125/1 OR1125/2
	<p>GANCHO O OBLÍCUO</p> 	0,9 mm	10 unidades	OR1126
	<p>GANCHO OK y OK OBLÍCUO</p> 	0,8 mm 0,8 mm	10 unidades 100 unidades	OR1127/1 OR1127/2
	<p>GANCHO N</p> 	0,9 mm 1,0 mm 1,2 mm	10 unidades 10 unidades 10 unidades	OR1128 OR1129 OR1130
	<p>GANCHO N BIFORMA</p> 	0,9 mm	10 unidades	OR1131
	<p>GANCHO NK</p> 	0,8 mm	10 piezas	OR1132
	<p>GANCHO T</p> 	0,9 mm	10 unidades	OR1133
	<p>GANCHO TK</p> 	0,9 mm 0,9 mm	10 unidades 100 unidades	OR1134/1 OR1134/2

Ortodoncia Removible e Interceptiva

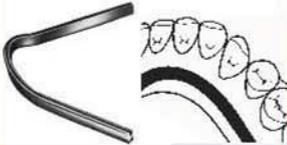
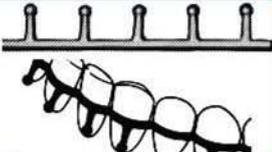
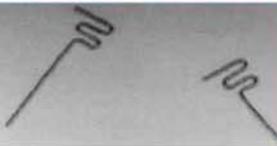
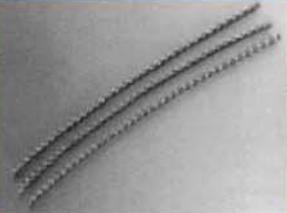
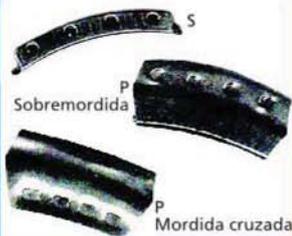
Ganchos preformados

		Colores / Medidas	Nº de piezas	Referencia
	GANCHO J 	0,9 mm	10 unidades	OR1135/1
		0,9 mm	100 unidades	OR1135/2
		1,0 mm	10 unidades	OR1136/1
		1,0 mm	100 unidades	OR1136/2
		1,1 mm	10 unidades	OR1137/1
		1,1 mm	100 unidades	OR1137/2
	GANCHO J OBLÍCUO 	0,9 mm	10 unidades	OR1138
		1,0 mm	10 unidades	OR1139
	GANCHO JM 	1,2 mm	10 unidades	OR1140
	GANCHO BOLA 	0,6 mm	10 unidades	OR1141/1
		0,6 mm	100 unidades	OR1141/2
		0,6 mm	1000 unidades	OR1141/3
		0,7 mm	10 unidades	OR1142/1
		0,7 mm	100 unidades	OR1142/2
		0,7 mm	1000 unidades	OR1142/3
		0,8 mm	10 unidades	OR1143/1
		0,8 mm	100 unidades	OR1143/2
		0,8 mm	1000 unidades	OR1143/3
		0,9 mm	10 unidades	OR1144/1
		0,9 mm	100 unidades	OR1144/2
0,9 mm	1000 unidades	OR1144/3		
	GANCHO ADAMS * 	↔ Ø		
		6 0,7 mm	10 unidades	OR1145/1
		6 0,7 mm	100 unidades	OR1145/2
		7 0,7 mm	10 unidades	OR1146/1
		7 0,7 mm	100 unidades	OR1146/2
		8 0,7 mm	10 unidades	OR1147/1
		8 0,7 mm	100 unidades	OR1147/2
		9 0,7 mm	10 unidades	OR1148/1
		9 0,7 mm	100 unidades	OR1148/2
		10 0,7 mm	10 unidades	OR1149/1
		10 0,7 mm	100 unidades	OR1149/2
		11 0,7 mm	10 unidades	OR1150/1
11 0,7 mm	100 unidades	OR1150/2		
	GANCHO FLECHA * 	0,7 mm	10 unidades	OR1151/1
		0,7 mm	100 unidades	OR1151/2
		0,7 mm	1000 unidades	OR1151/3
		0,8 mm	10 unidades	OR1152/1
		0,8 mm	100 unidades	OR1152/2
		0,8 mm	1000 unidades	OR1152/3
	GANCHO TRIANGULAR * 	0,7 mm	100 unidades	OR1153/1
		0,7 mm	1000 unidades	OR1153/2
		0,8 mm	100 unidades	OR1154/1
		0,8 mm	1000 unidades	OR1154/2
	GANCHO COFFIN * 	h= 11 mm Ø 1,2 mm	10 unidades 100 unidades	OR1155/1 OR1155/2

* En aleación libre de níquel

Ortodoncia Removible e Interceptiva

Ganchos preformados

		Medidas	Nº de piezas	Referencia
	ARCO LINGUAL CURVO Para refuerzo en placas de resina o prótesis removible arcada inferior.	80 mm 80 mm	10 unidades 100 unidades	OR1156/1 OR1156/2
	ARCO LINGUAL CON RETENCIÓN Ideal para férulas GELB de levante de mordida. Barra de perfil elíptico de cromo-níquel. Adaptado anatómicamente a la arcada inferior en retenciones para acrílico.	200 mm	10 unidades	OR1157
	FÉRULA METÁLICA Para ferulizar en caso de rotura maxilar. (20 botones).	1,0 mm 1,0 mm	10 unidades 100 unidades	OR1158/1 OR1158/2
	ARCOS LABIALES PREFORMADOS 12 tamaños superior diferentes. 3 tamaños inferior.		Kit surtido	OR1159
	GUÍAS SANDER FRONTALES Para el tratamiento de clases II, con aparatos bimaxilares. Soporte posicionador: facilita el posicionado de las guías junto con el tornillo de expansión. Base acrílica con angulación para test.	∅ 1,2 mm Patas 14 mm Patas 14 mm Patas 18 mm Patas 18 mm	5 unidades 50 unidades 5 unidades 50 unidades 5 unidades 1 unidad	OR1160/1 OR1160/2 OR1161/1 OR1161/2 OR1162 OR1163
	RESORTES INCISALES PREFORMADOS Con dobleces precisos y gran resiliencia.	0,5 mm 0,6 mm	12 unidades 12 unidades	OR1164 OR1165
	ALAMBRE REFUERZO Al incorporarse al acrílico, aumenta la resistencia. Recomendado en inferiores. Recubrimiento de oro. Acero inoxidable.	0,47 x 0,84 3-1/2 longitud		OR1166 OR1167
	PLACA METÁLICA TIPO C (PLANO OCLUSAL) Se utiliza para nivelar los incisivos superiores y para corregir la sobremordida en la aparatología removible.		5 unidades	OR1168
	EQUIPLAN DE BIMLER Tipo S - Plano de mordida anterior. Tipo P - Para sobremordida. Tipo P - Para mordida cruzada anterior.		10 unidades 25 unidades 100 unidades 10 unidades 25 unidades 100 unidades 10 unidades 25 unidades 100 unidades	OR1299/1 OR1299/2 OR1299/3 OR1300/1 OR1300/2 OR1300/3 OR1301/1 OR1301/2 OR1301/3

Ortodoncia Removible e Interceptiva

Alicates de laboratorio

		Referencia
A pair of bird beak pliers with long, pointed jaws.	ALICATE PICO DE PÁJARO (139) Para alambre de hasta $\varnothing 0,8$ mm.	OR1169
A pair of How pliers with curved, beak-like jaws.	ALICATE DE HOW (110) Adaptador de bandas.	OR1170
A pair of three-point pliers with three distinct points on the jaws.	ALICATE 3 PUNTAS (344) Ajuste pequeños dobleces.	OR1171
A pair of three-point pliers with three distinct points on the jaws.	ALICATE 3 PUNTAS / BARRAS Para doblar barras linguales. A partir de $\varnothing 0,9$ mm.	OR1172
A pair of Adams pliers with parallel jaws.	ALICATE DE ADAMS (135) Brazos paralelos a 1 mm de apertura.	OR1173
A pair of Angle pliers with beak-like jaws.	ALICATE DE ANGLE (134) Cónico y plano, para dobleces perfectos. Para alambre de menos de $\varnothing 0,7$ mm. Puntas con retención serrada.	OR1174
A pair of Angle pliers with beak-like jaws, similar to the 134 model.	ALICATE DE ANGLE (134 L) Igual que el 134, pero reforzado. Ideal para laboratorio. Para alambre de más de $\varnothing 0,7$ mm. Puntas con retención serrada.	OR1175
A pair of flat pliers with flat, parallel jaws.	ALICATE PLANO Para alambre de hasta $\varnothing 1,4$ mm.	OR1176
A pair of cutting pliers with sharp, beak-like jaws.	ALICATE DE CORTE Para alambre de $\varnothing 0,5$ mm a $\varnothing 1,2$ mm.	OR1177
A pair of pliers with long, thin jaws, used for bending Hyrax disjunction screws.	ALICATES PARA DOBLAR TORNILLOS DE DISYUNCIÓN HYRAX	OR1178

Ortodoncia Removible e Interceptiva

Alicates alineador estético, calentador y medidor de calor

Referencia



ALICATE DE AJUSTE DE FÉRULAS I

Cilíndrico.

Alicate ideal para la creación de botones de tracción o retención junto con el alicate II, en las planchas termomoldeadas.

OR1179



ALICATE DE AJUSTE DE FÉRULAS II

Redondo.

Alicate que permite finalizar y dar más retención a los botones en las planchas de termomoldeado.

OR1180



ALICATE DE AJUSTE DE FÉRULAS III

Esférico.

Alicate para la creación de puntos de presión sobre zonas muy concretas del diente, creando así un vector de fuerza.

OR1181



DENTAL BURNER - CALENTADOR DE ALICATES DE AJUSTE DE FÉRULAS

Pequeño y eficiente.

El calentador le permite calentarlos con una sola mano, presionando sobre la base cuadrada.

Requiere recarga de EconoGas.

OR1182

OR1183



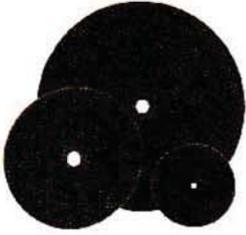
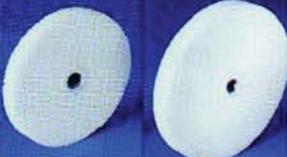
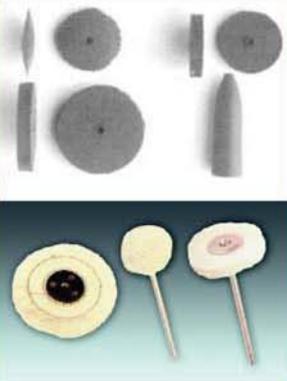
MEDIDOR DE TEMPERATURA DE ALICATES

Un alicate sobrecalentado le deformará la plancha, si está frío, la romperá; para evitar errores, mida la temperatura a la que están sus alicates para asegurar un "BUMP" perfecto en su retenedor invisible.

OR1184

Ortodoncia Removible e Interceptiva

Accesorios de pulido y desbastado

		Colores / Medidas	Nº de piezas	Referencia
	<p>DISCOS DE CORTE</p> <p>Discos de corte y desbastado, acrílico y metal. Puede trabajar hasta 24.000 rpm. Corte rápido.</p>	<p>Para pulidora Ø 63,5 mm</p> <p>Para pieza de mano Ø 38 mm Ø 14 mm</p>	<p>6 unidades</p> <p>10 unidades 50 unidades</p>	<p>OR1185</p> <p>OR1186 OR1187</p>
	<p>MIZZY WHITE HEATLESS WHEELS</p> <p>Las piedras en rueda de óxido de aluminio pueden desbastar metal. De corte rápido, no se calientan ni se embotan.</p>	<p>Para pieza de mano Ø 18 mm</p>	<p>50 unidades</p>	<p>OR1188</p>
	<p>PIEDRA DESBASTADO ACRÍLICO</p> <p>Ideal para trabajar con pulidora RED-WING. Para el desbastado grueso de acrílico.</p>	<p>Para pulidora 101 x 12,7 mm 76 x 9,5 mm</p>	<p>1 unidad 1 unidad</p>	<p>OR1189 OR1190</p>
	<p>GOMAS DE PULIDO Y AFINADO</p> <p>Para el pulido fino y abrillantado de zonas de difícil acceso, metálicas o acrílicas.</p> <p>Goma de pulido en forma de lenteja.</p> <p>Goma de pulido en punta.</p> <p>Cepillos de pulido. Montados en mandril.</p> <p>Cepillos de pulido acrílico, con centro de plomo. Para pulidora.</p>	<p>Para pieza de mano Ø 15,9 mm 20 mm longitud</p> <p>Ø 21 mm</p> <p>Ø 10 cm</p>	<p>10 unidades 10 unidades</p> <p>10 unidades</p> <p>1 unidad</p>	<p>OR1191 OR1192</p> <p>OR1193</p> <p>OR1194</p>
	<p>MANDRILES PARA PIEZA DE MANO</p> <p>Para discos de corte de 38 mm, Mizzy Wheels y pulido.</p>		<p>5 unidades</p>	<p>OR1195</p>
	<p>MANDRIL PARA PULIDORA</p> <p>Para discos de corte de 63,5 mm y piedra acrílica de 76 y 101 mm.</p>		<p>1 unidad</p>	<p>OR1196</p>
	<p>MANDRIL PARA GOMAS DE PULIDO EN PUNTA</p>		<p>5 unidades</p>	<p>OR1197</p>

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
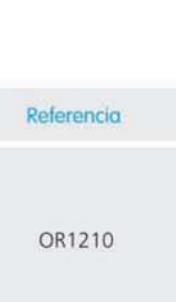
Ortodoncia Removible e Interceptiva

Accesorios de laboratorio

		Colores / Medidas	Nº de piezas	Referencia
	CUCHILLO DE LABORATORIO Nº7		1 unidad	OR1198
	CUTTER - 24		1 unidad	OR1199
	ZOCALADORES DE GOMA STANDARD Fácil de sacar, durable.		1 unidad	OR1200
	ZOCALADORES DE TP DE CAUCHO Para modelos de estudio ortodoncia. Mayor tamaño.		1 unidad	OR1201
	ZOCALADORES ARTICULADOS DE PLÁSTICO Bases con la forma perfecta, acabado brillante y articuladas. Total paralelismo, mantiene la relación de eje de bisagra.		10 pares	OR1202
	CAJAS CONTENEDORAS Para aparatos de ortodoncia o prótesis. En 5 colores. Pueden personalizarse bajo pedido.		10 unidades 100 unidades	OR1203/1 OR1203/2
	MODEL LUSTRE Líquido jabonoso para el acabado final de modelos de estudio. No amarillea el yeso. Da brillo a los modelos de estudio. El mejor del mercado.	4 litros	1 bidón	OR1204
	MECHERO DE GAS Hanaü bunsen touch o matic. Da llama al apoyar la mano. El loop/resistencia mantiene la cera caliente sin llama. Para butano y propano.	Butano Propano	1 unidad 1 unidad	OR1205 OR1206
	CERA REUS Cera rosa de modelar, en planchas de 174x90 mm. Espesor de 1,5 mm.	500 gr.	1 caja	OR1207
	ALGINATO CROMÁTICO Cambia de color al cambiar de fase. Fácil y económico.	450 g 450 g	1 bolsa 12 bolsas	OR1208/1 OR1208/2
	SURFACTANTE DELAR Aliviador de tensiones. Para conseguir un vaciado perfecto.	944 ml	1 unidad	OR1209

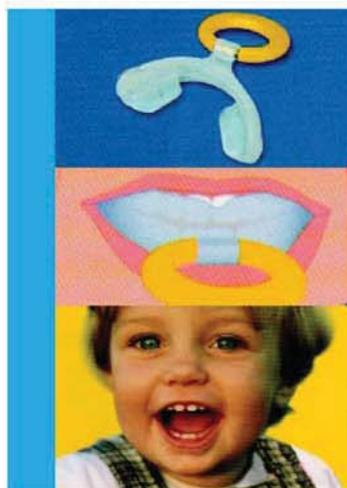
Ortodoncia Removible e Interceptiva

Material, recambios y accesorios para soldar

		Medidas	Referencia
	SOLDADURA DE PLATA EN PASTA TECHNOFLUX Fácil aplicación. ¡Económico!	38 g	OR1210
	ROLLO DE SOLDADURA DE PLATA Bajo punto de fusión, ideal para unir metales a bandas o alambres entre sí. ¡Nueva presentación en barillas!	9 g	OR1211
	FUNDENTE FLUX Permite que la soldadura fluya sobre los puntos a unir.	25 g	OR1212
	FABULUSTRE Pasta para pulido universal.	430 g	OR1213
	PANTALLA DE CALOR Protector de zonas delicadas a la hora de soldar. Evita que las zonas cubiertas por este gel se requemen.	554 g	OR1214
	KIT DE FRESAS PARA SOLDADURA Permiten todo el proceso de acabado después de soldar.	5 unidades	OR1215
	RECAMBIOS SOLDADORA MICROFLAMA Flux-2 Flux especial antioxidante Generador hidrógeno CH	Amarillo - 1l Verde - 1l Transparente - 1l	OR1216 OR1217 OR1218

Ortodoncia Removible e Interceptiva

Ortodoncia interceptiva



STOPPI

Para niños a partir de 2 años.
Elimina los malos hábitos y corrige la mordida abierta, producida por interposición lingual o succión digital de chupete o biberón.
Se recomienda usarlo de 2 a 4 horas durante el día y toda la noche.

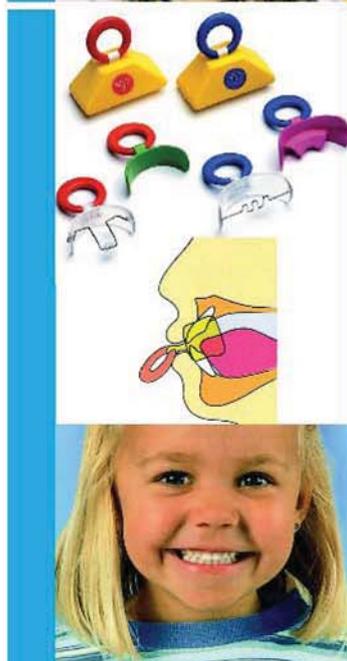


Medidas

1 pop = 6 unidades

Referencia

OR1219



PANTALLAS ORALES

Para la intercepción de hábitos. Pueden ser duras o blandas.

- Pantalla oral con avance.
- Pantalla oral con rejilla.
- Pantalla oral lisa.
- Pantalla oral con perla.

Evitan los hábitos: Succión del pulgar y dedos, Succión de labios, Respiración bucal habitual, Utilización de chupetes, Corrigen malfunciones de la lengua y refuerzan la musculatura del labio. Si los hábitos de succión son eliminados a tiempo, las maloclusiones dentales y esqueléticas serán prevenidas. Todo tipo de hábito de succión debe ser eliminado, antes de empezar un tratamiento ortodóntico. Crea un buen sellado labial, soluciona problemas de logopedia y permite que la anomalía se corrija por sí misma.

* Solicite nuestro manual de Preventiva.

Grande / Pequeña
Grande / Pequeña
Grande / Pequeña
Grande / Pequeña

OR1220/1 OR1220/2
OR1221/1 OR1221/2
OR1222/1 OR1222/2
OR1223/1 OR1223/2



POSISMILE

Se trata de un posicionador preformado con la oclusión ideal para la terminación de casos. Para conocer la medida adecuada, con la guía milimetrada que se suministra, medir de distal a distal de caninos superiores.

Sin extracciones

Con extracciones de los cuatro primeros premolares (superiores e inferiores).

Con extracciones de los primeros premolares superiores.

De 42 mm a 58 mm

De OR1224 a OR1240

De 45 mm a 60 mm

De OR1241 a OR1256

De 45 mm a 56 mm

De OR1257 a OR1268



SOPORTES CON VENTOSA PARA CEPILLOS DE DIENTES ¡Diversidos animales!

Ideales para pegar en espejo o baldosa, fáciles de abrir y cerrar por un click, patentado, ventilaciones laterales para óptima circulación de aire, para todo tipo de cepillos comerciales.

Vaca
Elefante
Zebra
León
Cerdo
Perro

OR1269
OR1270
OR1271
OR1272
OR1273
OR1274

Ortodoncia Removible e Interceptiva

Terapia miofuncional. Trainer

		Colores	Nº de piezas	Referencia
	<p>LINGUA TRAINER En silicona blanda. Para combinar con un tratamiento de Ortodoncia fija con brackets en la arcada superior. Gracias a la aleta reposicionadora, estimulamos una posición correcta de la lengua. También cuenta con un canal interno donde encajarán los brackets y el arco, mejorando así su posicionamiento.</p>	Transparente	1 unidad	OR1302
	<p>MYOBRACE (M.B.) CON DC INTERNO Se trata de un aparato corrector que funciona de manera parecida a un arco de ortodoncia fija, pues conduce a los dientes de una manera activa a la forma de arcada correcta. Se lleva durante 2 horas al día y toda la noche.</p>	Blanco Azul claro Azul	tamaño 1 tamaño 2 tamaño 3 tamaño 4 tamaño 5 tamaño 6 tamaño 7	OR1303/1 OR1303/2 OR1303/3 OR1303/4 OR1303/5 OR1303/6 OR1303/7
	<p>MYOBRACE (MBN) SIN DC INTERIOR Nuevo concepto de terapia miofuncional que corrige no solo la posición dental sino también de labios, lengua y articulación. Puede utilizarse como tratamiento activo o como retención. No tiene, al contrario que el Myobrace una guía dura interna, sino que está compuesto por material blando, parecido al del posicionador.</p>	Transparente	1 unidad 1 unidad 1 unidad 1 unidad 1 unidad 1 unidad 1 unidad	OR1304/1 OR1304/2 OR1304/3 OR1304/4 OR1304/5 OR1304/6 OR1304/7
	<p>POWRGARD UNIMAX POWRGARD BIMAX Protector deportivo para paciente con brackets, la rielera labial permite el paso del arco, podemos reajustarlo aplicando calor. Para maxilar superior e inferior, transparente, para brackets.</p>	Transparente Transparente	1 unidad 1 unidad	OR1308/1 OR1308/2
	<p>BRUXOGARD Ideal para pacientes bruxistas. Máximo confort y eficiencia. Material blando con superficie molar endurecida. Evita la compresión en la ATM y el dolor muscular.</p>	Transparente	1 unidad	OR1307
	<p>TRAINER PARA LA CORRECCIÓN DE CLASES II (T4C II) Trainer transparente, corrige las clases II mediante un efecto activador del avance mandibular. La pestaña para la lengua, corrige su posición. Más robusto que el T4B</p>	Transparente	1 unidad	OR1305
	<p>TRAINER PARA LA CORRECCIÓN DE LAS CLASES III Y II div. 2º Aparato corrector de clases III y II div. 2º. Sus pantallas tipo Fränkel evitan la presión de carrillos y lengua. Color amarillo.</p>	Amarillo	1 unidad	OR1306
	<p>TMD, blanco, duro, transparente, inferior. Aparato en silicona blanda biocompatible para uso diurno, en el tratamiento de trastornos articulares. Consiste en 2 capas de material, la externa un termoplástico y la interna en silicona blanda.</p>	Transparente	1 unidad	OR1310
	<p>TMJ – MBV, transparente, blando, bimaxilar Aparato bimaxilar para la corrección de problemas de apnea del sueño y ronquido mediante avance mandibular.</p>	Transparente	1 unidad	OR1311

Ortodoncia Removible e Interceptiva

Terapia miofuncional. Trainer



TRAINER DENTICIÓN DE LECHE

Un aparato activo de reeducación para los niños con dentición de leche, les permite trabajar correctamente músculos masticatorios. Reeduca la posición de la lengua y favorece la respiración nasal.



TRAINER POSITION PARA DENTICIÓN MIXTA, PRIMERA FASE. Blando

El Position Trainer, es un aparato preformado, disponible en dos durezas y tipos de material. El más blando, de silicona muy elástica, está indicado en la fase inicial del recambio, pues se adapta muy bien a los dientes en erupción, guiándolos hacia una arcada alineada.

Hace lo mismo con los labios, la lengua y las mejillas, evitando que se interpongan en el correcto proceso eruptivo.

T4K Fase inicial, recambio, superelástico



TRAINER POSITION PARA DENTICIÓN DE RECAMBIO, SEGUNDA FASE. Duro

El Position trainer de poliuretano algo más duro se aplica en la segunda fase de tratamiento, cuando los dientes se encuentran ya en la arcada y podemos aplicarles más presión.

Position trainer (T4K) Fase II (Duro).



"TRAINER ALINEAMIENTO" DENTICIÓN PERMANENTE

Sigue el principio del Position Trainer, aunque la forma de la arcada es mayor, para dentición permanente, es ideal para la corrección de hábitos como la interposición lingual, deglución atípica, respiración bucal, así como aparato de retención post-tratamiento o corrector de recidivas. La presentación es en 2 durezas, una más blanda inicial que debe usarse durante un par de meses y otra más dura para aplicar más fuerza en las fases siguientes.

Trainer alineamiento (T4A)



BITE STRIP

Instrumento diagnóstico.

Mide las veces que el paciente bruxa en la noche.

Colores	Nº de piezas	Referencia
Azul - Blando	1 unidad	OR1279
Rosa - Blando	1 unidad	OR1280
Azul - Duro*	1 unidad	OR1281
Rosa - Duro	1 unidad	OR1282
* También para niños bruxistas		
Azul	1 unidad	OR1283
Transparente	1 unidad	OR1284
Verde	1 unidad	OR1285
Transparente	1 unidad	OR1286
Rojo	1 unidad	OR1287
Fase I		
Elástico - Azul	1 unidad	OR1288
Elástico - Transparente	1 unidad	OR1289
Fase II		
Duro - Rojo	1 unidad	OR1290
Duro - Transparente	1 unidad	OR1291
		OR1292